

INSTRUÇÕES DE USO

BIOFLEX MICRO CANNULA

Cânulas Metálicas

MODELOS

22G X 50 mm

25G X 50 mm

27G X 50 mm

30G X 50 mm

CONTEÚDO

Cada embalagem possui 50 cânulas.

COMPOSIÇÃO

BioFlex Micro Cannula é composta por:

- tubo metálico constituído de Aço inoxidável AISI 304.
- conector base constituído de polipropileno.

INDICAÇÃO

BioFlex Micro Cannula é indicada para uso universal: cânula a ser inserida no vaso sanguíneo ou sob a pele, que é conectado a um conector ou tubo e tem uma parte comparativamente sólida, e pode ser utilizado para inserir fluidos no interior do corpo ou para aspirar fluidos dele.

MODO DE USO

1. Prepare a área da pele a ser tratada: limpe, lave e seque a pele, depois aplique o antisséptico. 2. Crie um furo de pré-injeção no ponto de entrada identificado, com a agulha. Através deste ponto de entrada, com uma mão, insira a micro cânula – previamente conectada à seringa – no nível de injeção desejado, enquanto aperta a pele entre o polegar e o indicador da outra mão. 3. Injetar o fluido.

EVENTOS ADVERSOS

Não se aplica efeitos adversos para esse material quando utilizado corretamente por profissional habilitado e para a indicação prevista na embalagem.

CONTRAINDICAÇÕES

Este dispositivo não deve ser usado em qualquer pessoa que tenha hipersensibilidade a qualquer um dos componentes deste dispositivo.

Este produto não deve ser usado em caso de doença cutânea aguda ou crônica (infecção ou inflamação) próximo à área a ser tratada.

PRECAUÇÕES

Verifique se há danos na embalagem.

Verifique a data de validade.

Leia o manual antes de usar.

Não use o produto da embalagem danificada.

ADVERTÊNCIAS

Este produto é feito apenas para uso único, e deve ser descartado após o uso, e sua reutilização após reesterilização é proibida.

Qualquer produto cuja embalagem individual (unitária) se apresenta aberta ou danificada não deve ser usado porque sua esterilização não é garantida.

Em caso de utilização de material contaminado, o paciente pode ser infectado com várias doenças infecciosas.

Não utilizar se o material for dobrado ou danificado antes do uso. É proibido qualquer uso que não seja para fins cirúrgicos gerais.

CONSERVAÇÃO, MANUSEIO E TRANSPORTE

Armazenar em local seco e limpo.

Transportar sempre em embalagem original.

DESCARTE

BioFlex Micro Cannula deve ser descartado imediatamente após o uso. Os materiais perfurocortantes devem ser descartados em recipientes identificados, rígidos, providos com tampa, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, conforme a legislação vigente de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Para o descarte correto dos materiais, deve-se seguir um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, seguindo as diretrizes da RDC 222, de 28/03/18 ou suas alterações.

REUTILIZAÇÃO

Este produto é para uso único. Não deve ser reutilizado.

Fabricado por:

FEEL TECH CO., LTD.

3,4 Floor, Standard Factory 2-dong, 15, Jayumuyeok2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do. Coreia do Sul

Registrado por:

Pratixia Dermo Soluções Ltda.

CNPJ 82.466.434/0001-46

Importado e Distribuído por:

Pharmaesthetics do Brasil – Indústria de Medicamentos LTDA

CNPJ: 82.466.434/0001-46

Endereço: Rua Antônio Zielonka, 1200 - Pinhais/PR - 83.323-210

Registro ANVISA nº: 81621070001

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: sac@pharmaesthetics.com.br ou 0800 943 9080

PRODUTOS DE USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

PRODUTO ESTÉRIL - ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

	Não reutilizar
	Número de lote
	Limite de temperatura
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Utilizar até data
	Atenção; consultar as Instruções de Uso
	Esterilizado por óxido de etileno
	Manter ao abrigo da luz solar
	Fabricante
	Data de fabricação